

Instrukcja używania

Wytwórca: Zakład Detali Medycznych DEMED Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 56C 43-190 Mikołów
Tel. 32 226 03 68; fax. 32 720 26 79 email: demed@demed.pl; www.demed.pl

Protezki do wszczepów wewnątrzusznych
Proteзка strzemiączka, typ I



CE 1434



STERILE EO

UWAGA!

Należy przeczytać uważnie ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla użytkownika. Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Wyrób jałowy, do jednorazowego użytku! Sterylizowany tlenkiem etylenu (EO).

Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania ani po terminie ważności podanym na opakowaniu. Nie resterylizować!

Przeznaczenie


Protezki są przeznaczone do chirurgicznego leczenia otosklerozy.

Charakterystyka wyrobu

Protezki są wykonane w całości z politetrafluoroetyleny (PTFE). Składają się z tłoczka i pierścienia leżącego w płaszczyźnie osi wzdłużnej tłoczka, naciętego pod kątem 45° w stosunku do osi wzdłużnej. Wymiary pierścienia są stałe, natomiast średnica tłoczka może wynosić 0,50 mm, 0,55 mm i 0,60 mm (odchyłki +0,04/- 0,05).

Wymiary

Kształt i stałe wymiary protezek przedstawiono na Rys.1.

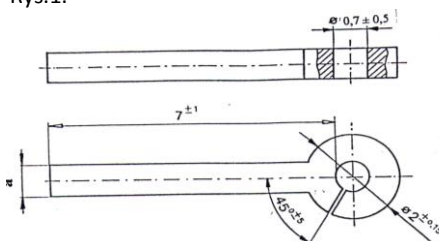

Rys. 1

Sposób stosowania

Po odcięciu brzegu torebki jałowe pudełko z protezką wyjąć na stolik z narzędziami lub jałową serwetę. Wyjąć protezkę i przygotować do założenia na wyrostek długi kowadełka. W tym celu zmierzyć odległość między niszą okienka a wyrostkiem długim kowadełka i przyciąć tłoczek protezki do wymaganej długości. Następnie rozszerzyć pierścień protezki za pomocą stożkowego instrumentu mikrochirurgicznego (Rys.2). Po rozszerzeniu pierścień przyjmuje kształt litery C, a jego rozwarście umożliwia wsunięcie protezki na wyrostek kowadełka. Można tego dokonać mikrokleszczkami, chwytając pierścień, jak pokazano na Rys. 3, i zwracając uwagę, aby ramiona kleszczyków nie znajdowały się w otworze pierścienia. Uchwycenie protezki najlepiej wykonać pod mikroskopem, przy małym powiększeniu. Po założeniu protezki na wyrostek długi kowadełka pierścień należy lekko docisnąć mikrokleszczkami na całym obwodzie wyrostka.



Rys. 2



Rys. 3

Czyszczenie i dezynfekcja

Wyrób jest jednorazowego użytku. Po usunięciu go z miejsca stosowania lub po samoistnym wypadnięciu wyrób nie nadaje się do dalszego użytkowania.

UWAGA!

Firma DEMED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia wyrobu lub resterylizacji wyrobów. Ponowna sterylizacja może stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Informacje handlowe

Numery katalogowe	101-03	101-04	101-05
Ø tłoczka, mm	0,50	0,55	0,60